



GUIDA RAPIDA ALL'USO

1 STERILIZZA I DIVARICATORI

Prima di ogni utilizzo, gli strumenti devono essere sterilizzati seguendo le istruzioni fornite Nel manuale di uso e manutenzione.



2 ESAMINA ATTENTAMENTE LA BOCCA DEL PAZIENTE

Prima di utilizzare il sistema di divaricatori è necessario ispezionare il cavo orale del paziente: accertati che non vi siano lesioni della mucosa; rimuovi eventuali protesi rimovibili, altri apparecchi rimovibili o qualsiasi altro dispositivo o ostacolo presente nella bocca del paziente.

3 IDENTIFICA IL DIVARICATORE APPROPRIATO PER L'ARCATA CHE STAI PER SCANSIONARE

Ogni kit di LO RUSSO RETRACTORS ha tre strumenti: due per l'arcata mandibolare (uno per il lato destro e uno per il lato sinistro) e uno per l'arcata mascellare.




3 DIVARICATORI / KIT

**KITS DI 3
MISURE**



4 PER L'ARCATA MANDIBOLARE, AVRAI BISOGNO DI DUE DIVARICATORI: DESTRO E SINISTRO.

La distinzione tra divaricatore sinistro e destro è molto semplice ed intuitiva, basta lasciarsi guidare dall'analogia tra la forma del braccio laterale dei divaricatori per l'arcata inferiore e la forma dell'arcata.

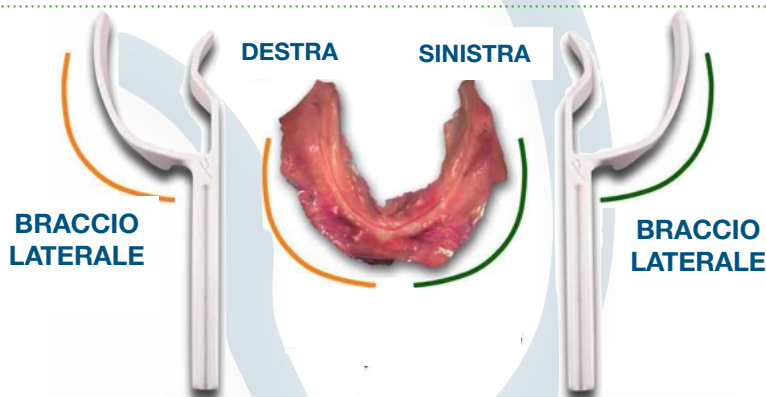


Ricorda: tieni sempre rivolto verso di te il logo inciso sul manico del divaricatore.

5 SELEZIONA ATTENTAMENTE LA DIMENSIONE DEI DIVARICATORI.


Sull'impugnatura dei divaricatori, dalla parte opposta al logo, sono presenti delle piccole indicazioni in rilievo (visibili ed apprezzabili al tatto) che identificano la dimensione dello strumento.

Nessun rilievo: misura 0;
1 rilievo: misura 1;
2 rilievi: misura 2.

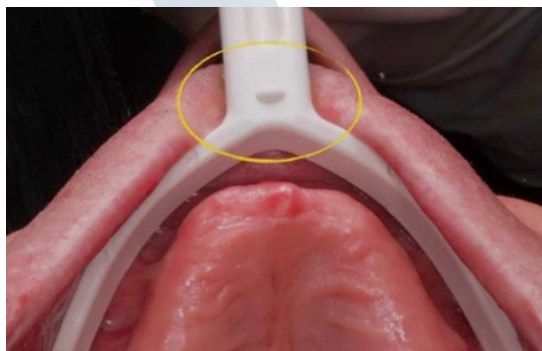

6 TIENI IL DIVARICATORE PER IL MANICO ED ORIENTALO CORRETTAMENTE

Per garantire il corretto orientamento degli strumenti, il logo inciso sull'impugnatura deve essere rivolto verso l'operatore.

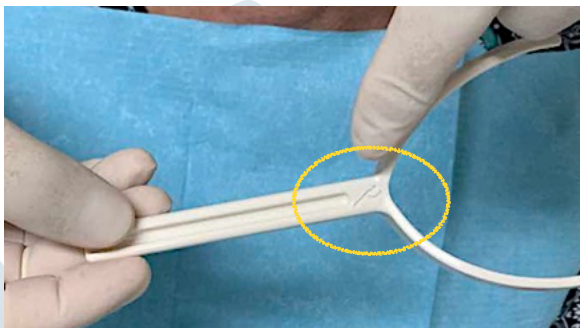

7 INSERISCI IL DIVARICATORE NELLA BOCCA DEL PAZIENTE

Presta attenzione durante l'inserimento dello strumento nella bocca del paziente. Per far ciò, esegui un piccolo movimento di rotazione dei bracci dello strumento, in maniera analoga al movimento effettuato per inserire un portaimpronta.



Dai un'occhiata a questi video per una dimostrazione pratica

Mascellare.
superiore

Mandibola



8 PORTA LO STRUMENTO IN POSIZIONE


Arcata sup.



Arcata inf.



Per l'arcata inferiore gli strumenti NON devono essere orientati parallelamente al piano sagittale, ma secondo quanto mostrato nell'immagine seguente.

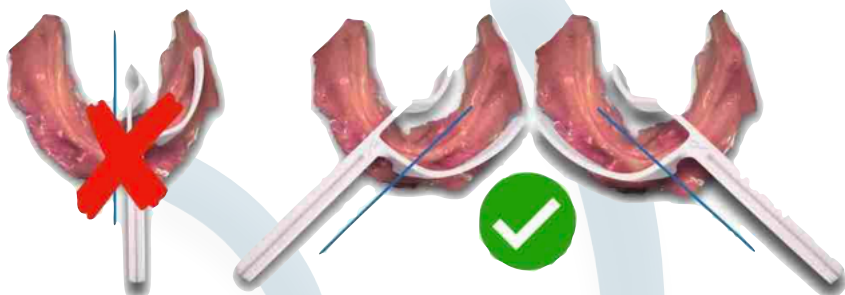

9 ACQUISISCI LA TUA SCANSIONE

Ora serve aver in mente una chiara strategia di scansione. Un utile riferimento in tal senso lo trovi al seguente link.



10 RIMUOVI LO STRUMENTO DALLA BOCCA DEL PAZIENTE

Dopo l'uso lo strumento deve essere rimosso con cautela, con un movimento opposto a quello di inserimento.

11 AVIA GLI STRUMENTI UTILIZZATI ALLA PROCEDURA DI PULIZIA E STERILIZZAZIONE.

La corretta pulizia e sterilizzazione degli strumenti, prima e dopo ogni utilizzo, è un prerequisito fondamentale per la tutela della salute dei pazienti e del personale. Fare sempre riferimento alle istruzioni fornite nel manuale d'uso, alle procedure operative specifiche per la struttura sanitaria e ai requisiti della legislazione locale.

Seguici su:

